
# DENTAL-KOMPRESSOREN

META Air META Air Light META CAM Zubehör

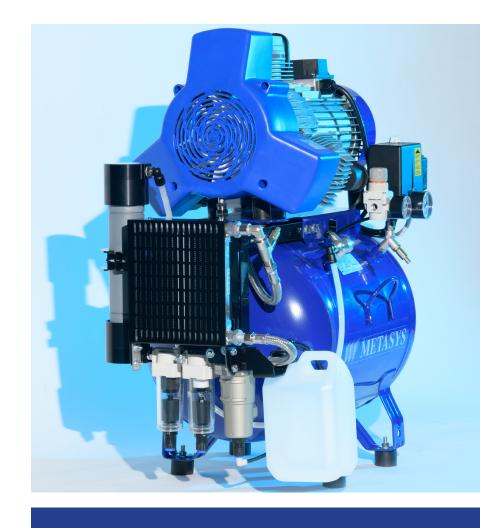



mit Membrantrockner mit Thermoschutz mit Stundenzähler

# ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS

Die Druckluft in zahnärztlichen Praxen muss höchsten hygienischen und medizinischen Standards entsprechen. Daher arbeiten alle METASYS Kompressoren absolut ölfrei und verfügen über ein integriertes Filter- und Trocknersystem (ausgenommen Light-Modelle).

### Wie unterscheiden sich die Standard- und Light-Versionen?

	Light-Version	Standard-Version
Vorfilter	✓	✓
Feinfilter	-	✓
Trockner	-	✓



### Überzeugende Details und durchdachte Technologie

### **Filtersystem**

Doppeltes Filtersystem bis 0,01 μm

#### Membrantrockner

Leistungsstarke Trocknung für absolut trockene Luft

### Verdichtertechnologie

Geräuscharmer Betrieb sowie Maximaldruck auf bis zu 10 bar möglich

### **Pulverbeschichtung**

Antibakterielle Pulver-Innenbeschichtung verhindert Korrosion des Druckluftbehälters

#### Betriebsstundenzähler

Ermöglicht eine genaue Definition der Wartungsintervalle

### **Thermoschutz**

Zweifacher, amperometrischer und thermischer, Schutz



# FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB IHRER PRAXIS

Effektive Werterhaltung für druckluftbetriebene Instrumente und Geräte

Feuchtigkeit in der dentalen Druckluft beeinträchtigt die Adhäsion und damit seine Haltbarkeit. Zudem bietet das feuchte Milieu optimale Lebensbedingungen für Mikroorganismen. Trockene Druckluft hingegen verhindert die Bildung von Biofilm in den Leitungen sowie Korrosion am Kompressor selbst und den daran angeschlossenen Instrumenten. METASYS Kompressoren verfügen über ein äußerst leistungsstarkes Membranfilter-System. Feuchtigkeit in der dentalen Druckluft wird somit auch unter schwierigsten klimatischen Bedingungen effektiv verhindert.





# Beste Behandlungsergebnisse durch hochwertige Druckluft

METASYS Kompressoren arbeiten absolut ölfrei. Ölbetriebene Kompressoren sind nicht für den Einsatz in der Zahnarztpraxis geeignet: kleinste Spuren von Öl in der Druckluft nehmen bereits negativen Einfluss auf die Haltbarkeit von Füllmaterialien an der Zahnsubstanz. Gleichzeitig führt Schmieröl zu Ablagerungen in den luftführenden Leitungen. Diese verursachen Leistungsverlust und frühzeitige Alterung von Kompressoren und druckluftbetriebenen Instrumenten.

Optimale Hygienebedingungen zum Schutz von Patient und Behandlungsteam

Während der zahnärztlichen Behandlung kommt Druckluft in Berührung mit offenen Wunden. Gleichzeitig führt die Verwendung von komprimierter Luft zu einer Aerosolwolke, welche ein erhebliches Infektionsrisiko für Behandler und Patienten darstellt. Eine hygienische Aufbereitung der dentalen Druckluft ist somit dringend erforderlich.

METASYS Kompressoren sind mit einem doppelten Filtersystem bis  $0.01 \, \mu m$  ausgestattet.\* Dieses sorgt für geschmacksneutrale Druckluft und einen optimalen Schutz vor Infektionen.




# HÖCHSTE QUALITÄT IN ALLEN DETAILS


# Hochwertige Bauteile für höchste Beanspruchungen

High-Tech Komponenten in den Elektromotoren sichern einen hohen Wirkungsgrad und konstante Motorleistung im Betrieb. Hitzebeständige Kugellager sorgen für Laufruhe und erhöhen die Lebensdauer des gesamten Aggregats.



Der Luftstrom der Ansaugluft wird durch ein Labyrinth der Komponenten des Verdichters geführt. Dies bewirkt zum einen eine Kühlung des Motors sowie der Bauteile und zum anderen eine Reduktion des Ansauggeräusches. Speziell konstruierte und zahlreiche Kühlrippen an der Außenseite des Aggregats bewirken zudem eine optimierte Wärmeabgabe.

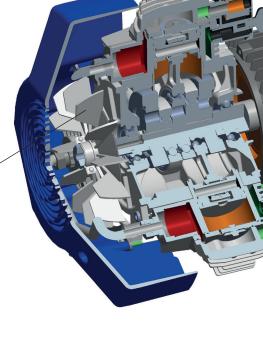

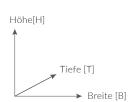






BestNr.	META Air 24s Light 106000005	META Air 24 Light 106000005	META Air 30 106000007	META Air 30 Light 106000009
Spannungsversorgung (V AC)	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*
Elektromotorleistung	0,55 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Fördermenge (5 bar)	77 l/min	135 I/min	120 l/min	135 l/min
Einschaltdauer	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %
Tankfassungsvermögen	24	24	40	40 I
Druckbereich	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
Schallpegel	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Schallpegel mit Abdeckung	52 dB(A)	52 dB(A)	-	-
Abmessungen (H x B x T)	550 x 400 x 400 mm	600 x 430 x 400 mm	770 x 710 x 410 mm	770 x 600 x 410 mm
Abmessungen mit Abdeckung (H x B x T)	800 x 530 x 500 mm	800 x 530 x 500 mm	-	-
Gewicht	28 kg	29 kg	38 kg	42 kg
Gewicht mit Abdeckung	44 kg	45 kg	-	-
BestNr. mit Abdeckung	120000357	120000357		-

<sup>\*</sup> auch erhältlich mit 60 Hz

### **TECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU**

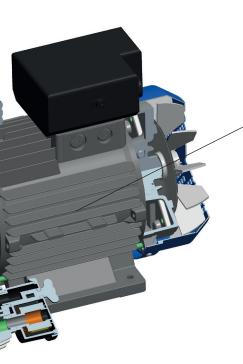

### **Optimierter Verdichtungsprozess**

METASYS Kompressoren überzeugen durch ein weiteres technisches Detail: Jeder Zylinder ist mit einem eigenen Luftfilter ausgestattet. Dadurch wird die Filtration der Ansaugluft verbessert und es steht jederzeit genug Luftvolumen zur Verdichtung bereit. Dieser optimierte Verdichtungsprozess erhöht die Lebensdauer der Kolben.

Das Aggregat ist das Herzstück eines jeden Kompressors. Das perfekte Zusammenspiel von Elektromotor- und Verdichter-Technologie garantiert Höchstleistungen im täglichen Einsatz. Die Verwendung hochwertiger Bauteile sorgt für Zuverlässigkeit bei höchsten Beanspruchungen. METASYS Kompressoren erfüllen diese Kundenansprüche in jeder Situation.





META Air 150 106000011	META Air 150 Light 106000015	META Air 250 106000019   106000022	META Air 250 Light 106000024
230 V	230 V	230 V   400 V	230 V   400 V
50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*
1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
152 l/min	170 l/min	225 I/min	250 l/min
≤ 70 %	≤ 80 %	≤ 70 %	≤ 80 %
40	40	40	40
5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)
770 x 710 x 410 mm	770 x 600 x 410 mm	810 x 710 x 410 mm	810 x 600 x 410 mm
890 x 720 x 490 mm	890 x 720 x 490 mm	890 x 490 x 720 mm	890 x 490 x 720 mm
50 kg	46 kg	58 kg	54 kg
98 kg	94 kg	106 kg	102 kg
106000012	106000016	106000020   106000023	106000025

## KOMPRESSOREN FÜR GROSSE ZAHNARZTPRAXEN

Großpraxen und Dentallabore benötigen aufgrund des erhöhten Luftmengenbedarfs leistungsstarke Kompressoren mit hohen Druckluftfördermengen. Die entsprechend kalkulierten Tankfassungsvermögen dieser Hochleistungskompressoren ermöglichen zudem ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Die METASYS Kompressoren META Air 450, 650 und 900 erfüllen diese Anforderungen in höchstem Maße.





	META Air 450	META Air 450 Light	META Air 650	META Air 650 Light
BestNr.	106000030	106000034	106000036	106000038
Spannungsversorgung (V AC)	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*
Elektromotorleistung	4,4 kW	4,4 kW	6,6 kW	6,6 kW
Fördermenge (5 bar)	450 I/min	500 l/min	660 I/min	750 l/min
Einschaltdauer	≤ 70 %	≤ 80 %	≤ 70 %	≤ 80 %
Tankfassungsvermögen	901	901	2001	2001
Druckbereich	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
Schallpegel	69 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Schallpegel mit Abdeckung	56 db(A)	56 dB(A)	-	-
Abmessungen (H x B x T)	820 x 1100 x 630 mm	820 x 1100 x 600 mm	900 x 1450 x 820 mm	910 x 1100 x 600 mm
Abmessungen mit Abdeckung (H x B x	T) 1020 x 1245 x 725 mm	1020 x 1245 x 725 mm	-	-
Gewicht	118 kg	113 kg	183 kg	173 kg
Gewicht mit Abdeckung	220 kg	215 kg	-	-
BestNr. mit Abdeckung	106000031	106000035	-	-

	META Air 900
BestNr.	106000040
Spannungsversorgung (V AC)	400 V
Frequenz	50 Hz*
Elektromotorleistung	10 kW
Fördermenge (5 bar)	780 I/min
Einschaltdauer	≤ 70 %
Tankfassungsvermögen	270
Druckbereich	5-7 bar
Schallpegel	75 dB(A)
Abmessungen (H x B x T)	1030 x 1560 x 1000 mm
Gewicht	240 kg
* 1 1 202 1 21 (0.11	

<sup>\*</sup> auch erhältlich mit 60 Hz

## KOMPRESSOREN FÜR CAD/CAM-FRÄSSYSTEME

Konventionelle Dental-Kompressoren im herkömmlichen Druckbereich von 5 bis 7 bar können den Anforderungen vieler dentaler Frässysteme nicht gerecht werden. CAD/CAM-Frässysteme hingegen benötigen einen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar, um z. B. die Sicherheit bei einem Werkzeugtausch zu gewährleisten. META CAM Kompressoren wurden eigens für solche Systeme konzipiert, da sie einen Druckbereich von 8 bis 10 bar sicherstellen. Ausgestattet mit Membrantrocknung und doppeltem Filterverfahren sorgen sie für die Bereitstellung von ölfreier, trockener und hygienisch einwandfreier Druckluft, die für die Qualität der Endprodukte entscheidend ist.



#### Hochdruckbereich bis 10 bar

META CAM Kompressoren arbeiten in einem Druckintervall von 8 bis zu 10 bar.

#### Hochwertige Bauteile in Aggregaten

META CAM Aggregate sind mit spezifischen Bauteilen ausgestattet, um den Belastungen im Hochdruckbereich gerecht zu werden.

#### **Optionale Schallabdeckung**

Die meisten META CAM Kompressoren sind optional mit Schallabdeckung erhältlich.

### Die richtige Wahl

Wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen META CAM Kompressors für die jeweilige Fräsbzw. Schleifmaschine. Weitere Informationen finden Sie auf www.metasys.com.

	META CAM 150	META CAM 250	META CAM 450	META CAM 650
BestNr.	107000001	107000004   107000008	107000010	107000013
Spannungsversorgung (V AC)	230 V	230 V   400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*
Elektromotorleistung	1,5 kW	2,2 kW	4,4 kW	6,6 kW
Fördermenge (5 bar)	152 l/min	225 I/min	450 I/min	
Fördermenge	103 l/min	148 l/min	296 l/min	440 l/min
Einschaltdauer	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %
Tankfassungsvermögen	40 I	40 I	901	200
Druckbereich	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Schallpegel	66 dB(A)	66 dB(A)	69 dB(A)	73 dB(A)
Schallpegel mit Abdeckung	53 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	-
Abmessungen (H x B x T)	770 x 710 x 410 mm	810 x 710 x 410 mm	820 x 1100 x 630 mm	850 x 1400 x 920 mm
Abmessungen mit Abdeckung (H x B x T)890 x 720 x 490 mm		890 x 720 x 490 mm	1020 x 1245 x 725 mm	-
Gewicht	50 kg	58 kg	118 kg	193 kg
Gewicht mit Abdeckung	98 kg	106 kg	220 kg	-
BestNr. mit Abdeckung	107000002	107000005   107000009	107000011	-

<sup>\*</sup> auch erhältlich mit 60 Hz

### **SERVICE UND WARTUNG**

### **Garantiezeit**

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Bei Durchführung der vorgeschriebenen "Ein-Jahres-Wartungen" bzw. eventuellen "3000- oder 1500-Stunden-Wartungen" kann die Garantiezeit um jeweils 1 Jahr, jedoch nicht mehr als 2 Jahre, verlängert werden. Die maximal mögliche Garantiezeit beträgt demzufolge 3 Jahre.







### Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle sind verbindlich einzuhalten. Folgende Wartungen sind vorgeschrieben: Der jährliche Filterpatronen-Tausch ("Filterpatronen-Austauschkit"), das "1500 h Kit" bzw. das "3000 h Kit" (kompressorenabhängig). Die getätigten Wartungen müssen im Gerätedokument dokumentiert werden. METASYS behält sich das Recht vor, Einsicht in die Wartungsaufzeichnungen zu nehmen.

### Wartungskits

auf Anfrage: info@metasys.com (Bitte Modulnummer und Seriennummer des zu servicierenden Kompressors bereitstellen)

### 3000 Stunden Kit + Ventilblock (komplett)

- > META Air Light (ab META Air 70 Light),
- > META CAM Versionen

### 1500 Stunden Kit 24/30 + Ventilblock (komplett)

> META Air 24/30

### Filterpatronen - Austauschkit

> Alle META Air, META Air Light, META CAM Versionen

### **METASYS Abdeckungen**

Unterschiedliche Abdeckungen für die jeweiligen META Air / META CAM Versionen bestellt werden, um den Geräuschpegel auf bis zu 54 dB(A) zu reduzieren.

METASYS Medizintechnik GmbH
METASYS logistics & collection GmbH
METASYS recycling & processing GmbH

Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria T +43 512 205420

www.metasys.com | info@metasys.com



