


# Dental- Kompressoren

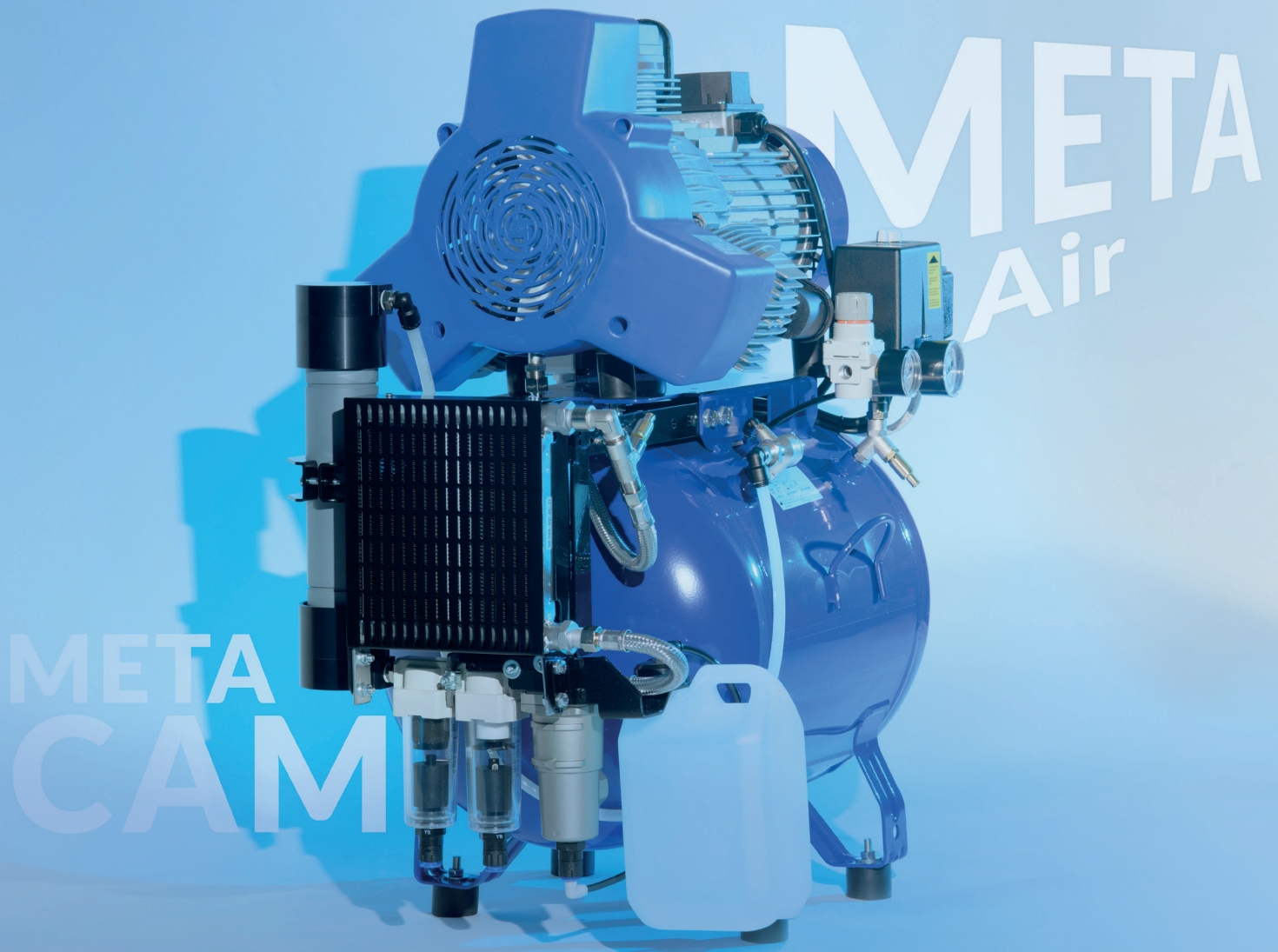


doppeltes Filtersystem | leistungsstarke Membrantrocknung  
mit zweifachem Thermoschutz

# ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS

Die Druckluft in zahnärztlichen Praxen muss höchsten hygienischen und medizinischen Standards entsprechen. Daher arbeiten alle METASYS Kompressoren absolut ölfrei und verfügen über ein integriertes Filter- und Trocknungssystem (ausgenommen Light-Modelle).

## Wie unterscheiden sich die Standard- und Light-Versionen?

	Light-Version	Standard-Version
Vorfilter	✓	✓
Feinfilter	-	✓
Trockner	-	✓

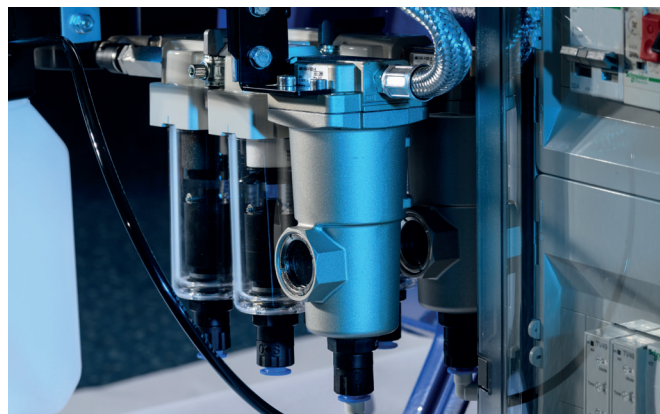

## Überzeugende Details und durchdachte Technologie



### Filtersystem

Doppeltes Filtersystem bis 0,01 µm

### Membrantrockner

Leistungsstarke Trocknung  
für absolut trockene Luft

### Verdichtertechnologie

Geräuscharmer Betrieb sowie Maximaldruck  
auf bis zu 10 bar möglich

### Pulverbeschichtung

Antibakterielle Pulver-Innenbeschichtung  
verhindert Korrosion des Druckluftbehälters

### Betriebsstundenzähler

Ermöglicht eine genaue Definition der  
Wartungsintervalle


### Thermoschutz

Zweifacher, amperometrischer und  
thermischer, Schutz

# FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB IHRER PRAXIS

## 1 Effektive Werterhaltung für druckluftbetriebene Instrumente und Geräte

Feuchtigkeit in der dentalen Druckluft beeinträchtigt die Adhäsion und damit seine Haltbarkeit. Zudem bietet das feuchte Milieu optimale Lebensbedingungen für Mikroorganismen. Trockene Druckluft hingegen verhindert die Bildung von Biofilm in den Leitungen sowie Korrosion am Kompressor selbst und den daran angeschlossenen Instrumenten. METASYS Kompressoren verfügen über ein äußerst leistungsstarkes Membranfilter-System. Feuchtigkeit in der dentalen Druckluft wird somit auch unter schwierigsten klimatischen Bedingungen effektiv verhindert.

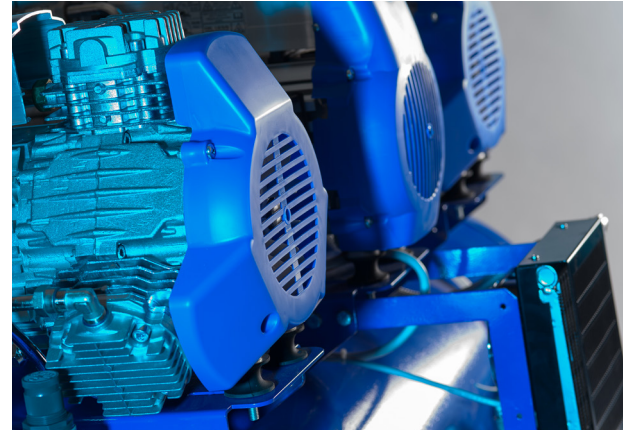


## 2 Beste Behandlungsergebnisse durch hochwertige Druckluft

METASYS Kompressoren arbeiten absolut ölfrei. Ölbetriebene Kompressoren sind nicht für den Einsatz in der Zahnarztpraxis geeignet: kleinste Spuren von Öl in der Druckluft nehmen bereits negativen Einfluss auf die Haltbarkeit von Füllmaterialien an der Zahnschicht. Gleichzeitig führt Schmieröl zu Ablagerungen in den luftführenden Leitungen. Diese verursachen Leistungsverlust und frühzeitige Alterung von Kompressoren und druckluftbetriebenen Instrumenten.

## 3 Optimale Hygienebedingungen zum Schutz von Patient und Behandlungsteam

Während der zahnärztlichen Behandlung kommt Druckluft in Berührung mit offenen Wunden. Gleichzeitig führt die Verwendung von komprimierter Luft zu einer Aerosolwolke, welche ein erhebliches Infektionsrisiko für Behandler und Patienten darstellt. Eine hygienische Aufbereitung der dentalen Druckluft ist somit dringend erforderlich. METASYS Kompressoren sind mit einem doppelten Filtersystem bis  $0,01\ \mu\text{m}$  ausgestattet.\* Dieses sorgt für geschmacksneutrale Druckluft und einen optimalen Schutz vor Infektionen.

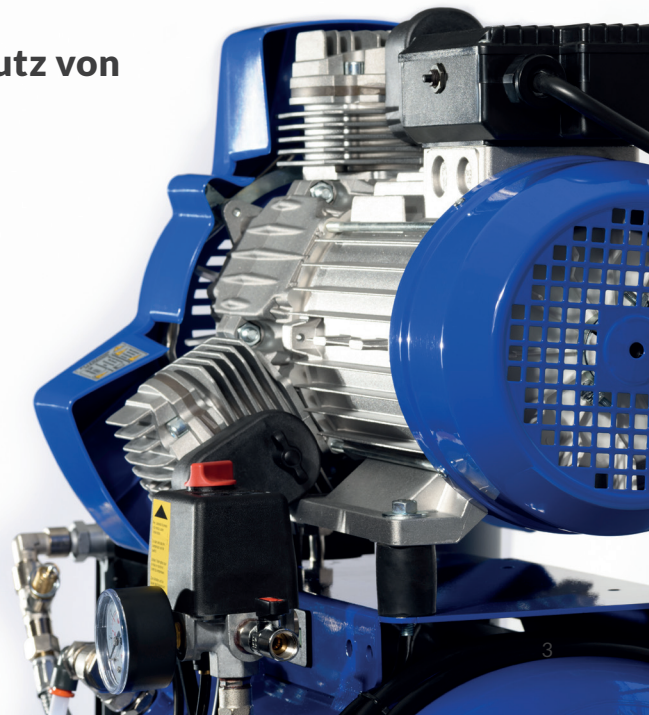

\* Gemäß Druckluftanforderungen ISO 8573\_1:2010 - Klassen 1/4/1.



# HÖCHSTE QUALITÄT IN ALLEN DETAILS

## Hochwertige Bauteile für höchste Beanspruchungen

High-Tech Komponenten in den Elektromotoren sichern einen hohen Wirkungsgrad und konstante Motorleistung im Betrieb. Hitzebeständige Kugellager sorgen für Laufruhe und erhöhen die Lebensdauer des gesamten Aggregats.

## Patentiertes Ansaugsystem


Der Luftstrom der Ansaugluft wird durch ein Labyrinth der Komponenten des Verdichters geführt. Dies bewirkt zum einen eine Kühlung des Motors sowie der Bauteile und zum anderen eine Reduktion des Ansaugeräusches. Speziell konstruierte und zahlreiche Kühlrippen an der Außenseite des Aggregats bewirken zudem eine optimierte Wärmeabgabe.

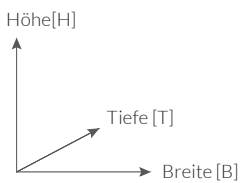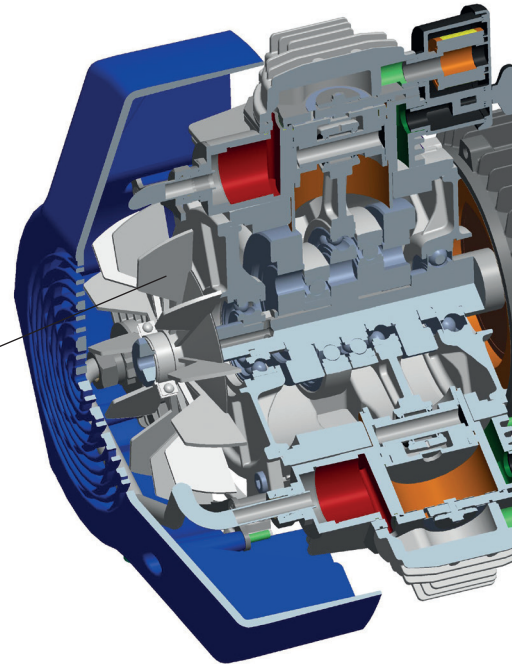

	META Air 24	META Air 24 Light	META Air 30	META Air 30 Light
Best.-Nr.	106000001	106000005	106000007	106000009
Spannungsversorgung (V AC)	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*
Elektromotorleistung	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Fördermenge (5 bar)	120 l/min	135 l/min	120 l/min	135 l/min
Einschaltdauer	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %
Tankfassungsvermögen	24 l	24 l	40 l	40 l
Druckbereich	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
Schallpegel	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Schallpegel mit Schalldämmschrank	52 dB(A)	52 dB(A)	-	-
Abmessungen (H x B x T)	600 x 500 x 420 mm	600 x 430 x 400 mm	770 x 710 x 410 mm	770 x 600 x 410 mm
Abmessungen mit Schalldämmschrank (H x B x T)**	800 x 530 x 500 mm	800 x 530 x 500 mm	-	-
Gewicht	36 kg	29 kg	38 kg	42 kg
Gewicht mit Schalldämmschrank	-	-	-	-
Best.-Nr. mit Schalldämmschrank	-	-	-	-

\* auch erhältlich mit 60 Hz | \*\* Die Tiefenabmessungen können bei vorhandenem Kondensatbehälter abweichen.

# TECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

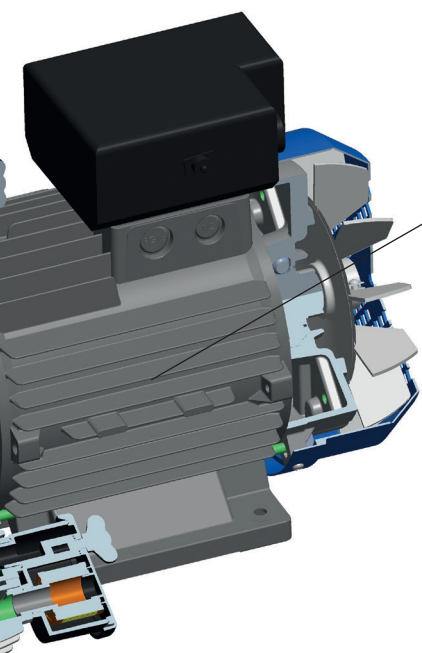

## Optimierter Verdichtungsprozess

METASYS Kompressoren überzeugen durch ein weiteres technisches Detail: Jeder Zylinder ist mit einem eigenen Luftfilter ausgestattet. Dadurch wird die Filtration der Ansaugluft verbessert und es steht jederzeit genug Luftvolumen zur Verdichtung bereit. Dieser optimierte Verdichtungsprozess erhöht die Lebensdauer der Kolben.



## Leistung und Zuverlässigkeit


Das Aggregat ist das Herzstück eines Kompressors. Das Zusammenspiel von Elektromotor und Verdichter garantiert Höchstleistungen. Hochwertige Bauteile sorgen für Zuverlässigkeit, auch bei höchster Beanspruchung. METASYS Kompressoren erfüllen diese Anforderungen stets.



META Air 150	META Air 150 Light	META Air 250	META Air 250 Light
106000011	106000015	106000019	106000022
230 V	230 V	230 V	400 V
50 Hz*	50 Hz*	50 Hz*	50/60 Hz
1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
152 l/min	170 l/min	225 l/min	250 l/min
≤ 70 %	≤ 80 %	≤ 70 %	≤ 80 %
40 l	40 l	40 l	40 l
5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)
770 x 710 x 410 mm	770 x 600 x 410 mm	810 x 710 x 410 mm	810 x 600 x 410 mm
915 x 750 x 530 mm	915 x 750 x 530 mm	915 x 750 x 530 mm	915 x 750 x 530 mm
50 kg	46 kg	58 kg	54 kg
98 kg	94 kg	106 kg	102 kg
106000012	106000016	106000020	106000023
			106000025

# KOMPRESSOREN FÜR GROSSE ZAHNARZTPRAXEN

Großpraxen und Dentallabore benötigen leistungsstarke Kompressoren, die hohe Druckluftfördermengen zuverlässig liefern. Diese Kompressoren müssen den kontinuierlichen Betrieb auch bei intensiver Nutzung über längere Zeiträume sichern. Die kalkulierten Tankfassungsvermögen dieser Hochleistungskompressoren gewährleisten eine konstante und unterbrechungsfreie Luftversorgung für eine effiziente Arbeitsweise. Die METASYS Kompressoren META Air 450, 650 und 900 erfüllen diese Anforderungen in höchstem Maße und bieten herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz in Großpraxen und Dentallaboren.

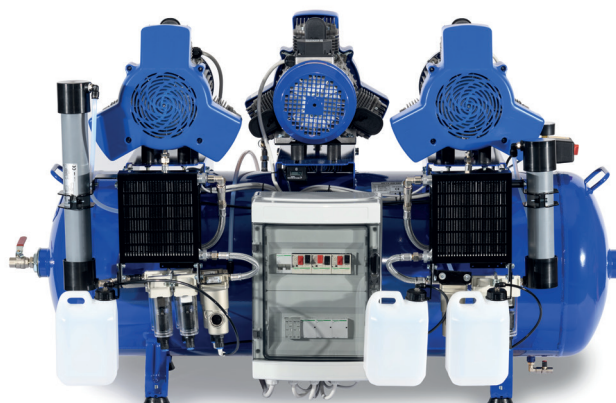

**META Air 450**

**META Air 450 Light**

Best.-Nr.	106000027	106000030	106000034
Spannungsversorgung (V AC)	230 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz*	50/60 Hz	50/60 Hz
Elektromotorleistung	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW
Fördermenge (5 bar)	450 l/min	450 l/min	500 l/min
Einschaltdauer	≤ 70 %	≤ 70 %	≤ 80 %
Tankfassungsvermögen	90 l	90 l	90 l
Druckbereich	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
Schallpegel	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Schallpegel mit Schalldämmschrank	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Abmessungen (H x B x T)	820 x 1100 x 600 mm	820 x 1100 x 600 mm	820 x 1100 x 600 mm
Abmessungen mit Schalldämmschrank (H x B x T)**	1020 x 1245 x 725 mm	1020 x 1245 x 725 mm	1020 x 1245 x 725 mm
Gewicht	118 kg	118 kg	113 kg
Gewicht mit Schalldämmschrank	225 kg	225 kg	220 kg
Best.-Nr. mit Schalldämmschrank	106000031	106000033	106000035

**META Air 650**

**META Air 650 Light**

**META Air 900**

Best.-Nr.	106000036	106000038	106000040
Spannungsversorgung (V AC)	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Elektromotorleistung	6,6 kW	6,6 kW	10 kW
Fördermenge (5 bar)	660 l/min	750 l/min	780 l/min
Einschaltdauer	≤ 70 %	≤ 80 %	≤ 70 %
Tankfassungsvermögen	200 l	200 l	270 l
Druckbereich	5-7 bar	5-7 bar	5-7 bar
Schallpegel	72 dB(A)	72 dB(A)	75 dB(A)
Abmessungen (H x B x T)	900 x 1450 x 820 mm	910 x 1100 x 600 mm	1030 x 1560 x 1000 mm
Gewicht	183 kg	173 kg	240 kg

\* auch erhältlich mit 60 Hz | \*\* Die Tiefenabmessungen können bei vorhandenem Kondensatbehälter abweichen.

# KOMPRESSOREN FÜR CAD/CAM-FRÄSSYSTEME

Konventionelle Dental-Kompressoren im herkömmlichen Druckbereich von 5 bis 7 bar können den Anforderungen vieler dentaler Frässysteme nicht gerecht werden. CAD/CAM-Frässysteme hingegen benötigen einen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar, um z. B. die Sicherheit bei einem Werkzeugtausch zu gewährleisten. META CAM Kompressoren wurden eigens für solche Systeme konzipiert, da sie einen Druckbereich von 8 bis 10 bar sicherstellen. Ausgestattet mit Membrantrocknung und doppeltem Filterverfahren sorgen sie für die Bereitstellung von ölfreier, trockener und hygienisch einwandfreier Druckluft, die für die Qualität der Endprodukte entscheidend ist.



## Hochdruckbereich bis 10 bar

META CAM Kompressoren arbeiten in einem Druckintervall von 8 bis zu 10 bar.

## Hochwertige Bauteile in Aggregaten

META CAM Aggregate sind mit spezifischen Bauteilen ausgestattet, um den Belastungen im Hochdruckbereich gerecht zu werden.

## Optionaler Schalldämmschrank

Die meisten META CAM Kompressoren sind optional mit Schalldämmschrank erhältlich.

## Die richtige Wahl

Wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen META CAM Kompressors für die jeweilige Fräs- bzw. Schleifmaschine. Weitere Informationen finden Sie auf [www.metasys.com](http://www.metasys.com).

	META CAM 150	META CAM 250	META CAM 450	META CAM 650
Best.-Nr.	107000001	107000004	107000008	107000013
Spannungsversorgung (V AC)	230 V	230 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz*	50 Hz*	50/60 Hz	50/60 Hz
Elektromotorleistung	1,5 kW	2,2 kW	4,4 kW	6,6 kW
Fördermenge (5 bar)	152 l/min	225 l/min	450 l/min	660 l/min
Fördermenge (8 bar)	103 l/min	148 l/min	296 l/min	444 l/min
Einschaltdauer	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %
Tankfassungsvermögen	40 l	40 l	90 l	200 l
Druckbereich	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Schallpegel	66 dB(A)	66 dB(A)	69 dB(A)	73 dB(A)
Schallpegel mit Schalldämmschrank	53 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	-
Abmessungen (H x B x T)	770 x 710 x 410 mm	810 x 710 x 410 mm	820 x 1100 x 600 mm	900 x 1450 x 820 mm
Abmessungen mit Schalldämmschrank (H x B x T)	915 x 750 x 530 mm	915 x 750 x 530 mm	1020 x 1245 x 725 mm	-
Gewicht	50 kg	58 kg	118 kg	183 kg
Gewicht mit Schalldämmschrank	98 kg	106 kg	220 kg	-
Best.-Nr. mit Schalldämmschrank	107000002	107000005	107000009	-

\* auch erhältlich mit 60 Hz | \*\* Die Tiefenabmessungen können bei vorhandenem Kondensatbehälter abweichen.

Für die Auswahl eines META CAM Kompressors muss vorab eine Druckluftbedarfsberechnung bzw. nach Installation eine Validierung mit der Fräsmaschine durchgeführt werden.

# SERVICE UND WARTUNG

## Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Bei Durchführung der vorgeschriebenen „Ein-Jahres-Wartungen“ bzw. eventuellen „3000- oder 1500-Stunden-Wartungen“ kann die Garantiezeit um jeweils 1 Jahr, jedoch nicht mehr als 2 Jahre, verlängert werden. Die maximal mögliche Garantiezeit beträgt demzufolge 3 Jahre.

## Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle sind verbindlich einzuhalten. Folgende Wartungen sind vorgeschrieben: Der jährliche Filterpatronen-Tausch („Filterpatronen-Austauschkit“), das „1500 h Kit“ bzw. das „3000 h Kit“ (kompressorenabhängig). Die getätigten Wartungen müssen im Gerätedokument dokumentiert werden. METASYS behält sich das Recht vor, Einsicht in die Wartungsaufzeichnungen zu nehmen.

## Wartungskits

auf Anfrage: [info@metasys.com](mailto:info@metasys.com)

(Bitte Modulnummer und Seriennummer des zu servicierenden Kompressors bereitstellen)

### 3000 Stunden Kit + Ventilblock (komplett)

META Air Light (ab META Air 70 Light),

META CAM Versionen

### 1500 Stunden Kit 24/30 + Ventilblock (komplett)

META Air 24/30

### Filterpatronen - Austauschkit

Alle META Air, META Air Light, META CAM Versionen

## METASYS Schalldämmschränk

Es können unterschiedliche Schalldämmschranke für die jeweiligen META Air / META CAM Versionen bestellt werden, um den Geräuschpegel auf bis zu 54 dB(A) zu reduzieren.

**METASYS Medizintechnik GmbH**

**METASYS logistics & collection GmbH**

**METASYS recycling & processing GmbH**

Florianistraße 3, 6063 Rum, Austria (AT)

T +43 512 205420

[www.metasys.com](http://www.metasys.com) | [info@metasys.com](mailto:info@metasys.com)

 **METASYS**  
protect what you need

