

So einfach können Sie Ihren vollen Amalgamsammelbehälter entsorgen:


1 DESINFIZIEREN



GREEN & CLEAN M2


MULTI SYSTEM TYP 1 **10 ml**
 COMPACT Dynamic **10 ml**
 ECO II+ **20 ml**

Desinfektionsmittel für Absauganlagen in den vollen Sammelbehälter gießen.

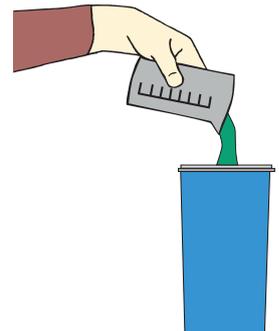


2 VERSCHLIESSEN

Vollen Sammelbehälter mit dem grünen Deckel durch festen Druck verschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsnasen des Verschlussdeckels am Behälter eingerastet sind.

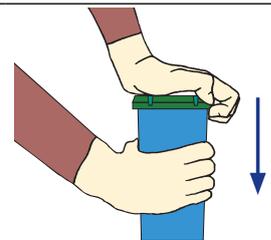


3 DICHTHEITSPROBE

Dichtheitsprobe durchführen, dazu den verschlossenen Sammelbehälter über einem Auffanggefäß auf den Kopf stellen. Gegebenenfalls den Deckel nochmals fest verschließen.

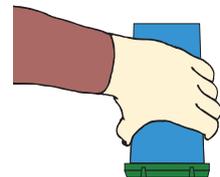


4 VERPACKEN

Den ordnungsgemäß verschlossenen Sammelbehälter in die 2 Styropor-Halbschalen einlegen und dann in den Transportkarton geben.

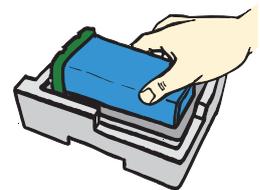

Transportkarton entsprechend beiliegender Anleitung verschließen.

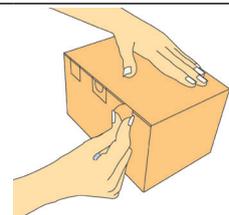

5 VERSAND

Bitte beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen für den Versand. Sollten Sie Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.