

# So einfach können Sie Ihren vollen MST 1 / COMPACT Dynamic Amalgamsammelbehälter entsorgen:


## 1 DESINFIZIEREN



**GREEN & CLEAN M2**

MULTI SYSTEM TYP 1 **10 ml**  
COMPACT Dynamic **10 ml**

Desinfektionsmittel für Absauganlagen in den vollen Sammelbehälter gießen.

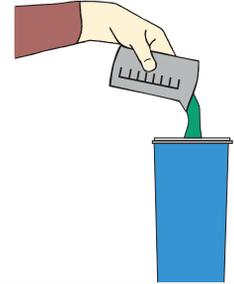


## 2 VERSCHLIESSEN

Vollen Sammelbehälter mit dem grünen Deckel durch festen Druck verschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsnasen des Verschlussdeckels am Behälter eingerastet sind.



## 3 DICHTHEITSPROBE

Dichtheitsprobe durchführen, dazu den verschlossenen Sammelbehälter über einem Auffanggefäß auf den Kopf stellen. Gegebenenfalls den Deckel nochmals fest verschließen.

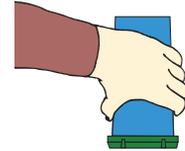


## 4 VERPACKEN

Den ordnungsgemäß verschlossenen Sammelbehälter in die 2 Styropor-Halbschalen einlegen und dann in den Transportkarton geben.



Transportkarton verschließen.

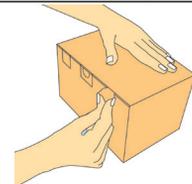

## 5 VERSAND

Hier finden Sie eine Auflistung unserer Sammelstellen mit Informationen zum Ablauf der entsorgung und Kontaktinformationen:  
[www.metasys.com/sammelstellen](http://www.metasys.com/sammelstellen)