

VOLLER AMALGAMSAMMELBEHÄLTER?

Nutzen Sie unser Dienstleistungspaket!

Bei Entsorgung eines vollen METASYS Amalgambehälters erhalten Sie automatisch einen neuen Behälter im Austausch!

METASYS logistics & collection GmbH übernimmt nicht nur die ordnungsgemäße Entsorgung, sondern auch die Meldung an die Behörde - die Zahnarztpraxis erhält eine entsprechende Entsorgungsbestätigung. Wenn Sie Ihre Amalgamabfälle über METASYS logistics & collection GmbH entsorgen, so benötigen Sie keinen Begleitschein. Fordern Sie den entsprechenden Freistellungsbescheid bei uns an!

So einfach können Sie Ihren vollen Amalgamsammelbehälter entsorgen:

1


DESINFIZIEREN



**GREEN
& CLEAN** **M2**

MULTI SYSTEM TYP 1 **10 ml**
COMPACT Dynamic **10 ml**
ECO II **20 ml**

Desinfektionsmittel für Absauganlagen in
den vollen Sammelbehälter gießen.

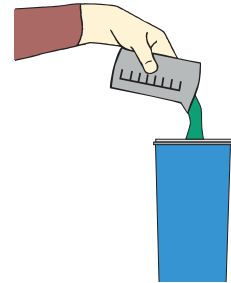


2

VERSCHLIESSEN

Vollen Sammelbehälter mit dem grünen Deckel durch festen Druck verschließen.
Dabei zeigen der Pfeil auf dem grünen Deckel und der Schriftzug am Behälter
Richtung Person.


Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsnasen des Verschlussdeckels am Behälter
eingerastet sind.

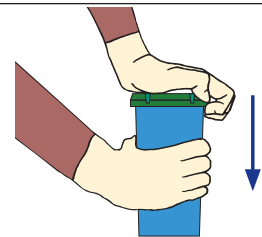

3

DICHTHEITSPROBE


Dichtheitsprobe durchführen, dazu den verschlossenen Sammelbehälter über einem
Auffanggefäß auf den Kopf stellen. Gegebenenfalls den Deckel nochmals fest
verschließen.

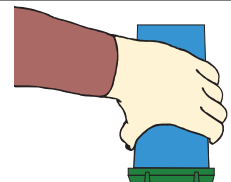


4

VERPACKEN

Den ordnungsgemäß verschlossenen Sammelbehälter in die 2 Styropor-Halbschalen
einlegen und dann in den Transportkarton geben.

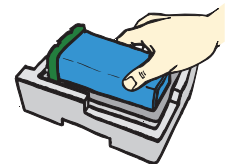

Transportkarton entsprechend beiliegender Anleitung verschließen.

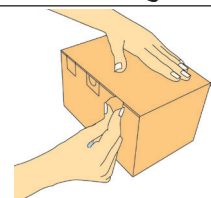

5

VERSAND

Flexibel, schnell und einfach! Senden Sie das Paket an unsere Niederlassung. Verwenden Sie hierfür das DHL-Retourenlabel, welches
Sie online auf unserer Website ausdrucken können. **Die Anleitung finden Sie auf der Rückseite.**



Schnell und flexibel selbst drucken!

Für den Versand des vollen Amalgamsammelbehälters benötigen Sie ein DHL-Retourenlabel, das Sie ganz einfach über unser DHL-Retourenportal ausdrucken können!

1

Besuchen Sie

www.metasys.com/dhl



Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den **JETZT STARTEN**-Button. Sie werden automatisch weitergeleitet.

Füllen Sie die **Pflichtfelder (*)** aus. Optional können Sie unter „Auftragsnummer“ Ihre Kundennummer angeben.

Dann auf „Weiter“ klicken.

2

Nun müssen Sie nur noch das PDF öffnen und drucken.

3

Schneiden Sie die **rechte Seite** des Dokuments an der markierten Linie ab und kleben diese auf Ihr Paket.

Die **linke Seite** ist Ihre Auftragsbestätigung - diese ist für Ihre Unterlagen.

4

Bringen Sie Ihr Paket zur nächsten **DHL-Annahmestelle** oder geben Sie es Ihrem **DHL-Zusteller** mit.

