

VOLLER AMALGAMSAMMELBEHÄLTER?

Nutzen Sie unser Dienstleistungspaket!

Bei Entsorgung eines vollen METASYS Amalgambehälters erhalten Sie automatisch im Austausch einen neuen Behälter plus Post-Etikett und Begleitschein!

METASYS logistics & collection GmbH übernimmt nicht nur die ordnungsgemäße Entsorgung, sondern auch die Meldung an die Behörde - die Zahnarztpraxis erhält eine entsprechende Entsorgungsbestätigung. Als AbfallerzeugerIn sind Sie rechtlich verpflichtet, einen Begleitschein für gefährlichen Abfall auszufüllen und beim Versand des vollen Behälters beizulegen.

So einfach können Sie Ihren vollen Amalgamsammelbehälter entsorgen:

1

DESINFIZIEREN




GREEN
& CLEAN

M2

MULTI SYSTEM TYP 1 **10 ml**
COMPACT Dynamic **10 ml**
ECO II **20 ml**

Desinfektionsmittel für Absauganlagen in den vollen Sammelbehälter gießen.

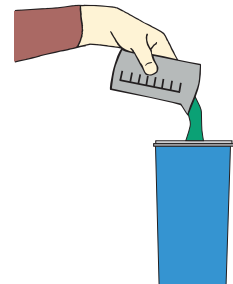


2

VERSCHLIESSEN

Vollen Sammelbehälter mit dem grünen Deckel durch festen Druck verschließen. Dabei zeigen der Pfeil auf dem grünen Deckel und der Schriftzug am Behälter Richtung Person.


Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsnasen des Verschlussdeckels am Behälter eingerastet sind.

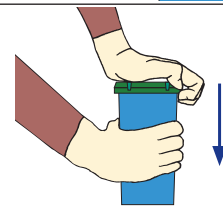

3

DICHTHEITSPROBE


Dichtheitsprobe durchführen, dazu den verschlossenen Sammelbehälter über einem Auffanggefäß auf den Kopf stellen. Gegebenenfalls den Deckel nochmals fest verschließen.

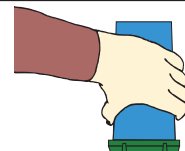


4

VERPACKEN

Den ordnungsgemäß verschlossenen Sammelbehälter in die 2 Styropor-Halbschalen einlegen und dann in den Transportkarton geben.

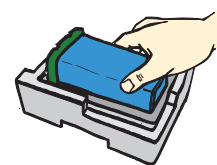

Transportkarton entsprechend beiliegender Anleitung verschließen.

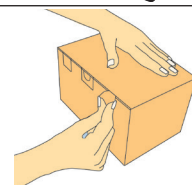

5

VERSAND: BEGLEITSCHIN FÜR GEFÄHRLICHEN ABFALL

Als AbfallerzeugerIn sind Sie rechtlich verpflichtet, einen Begleitschein auszufüllen und dem vollen Behälter beizulegen. Sie finden einen Vordruck des Begleitscheins in der Lieferscheintasche oder im Karton des Behälters oder online auf unserer Website unter www.metasys.com/downloads.

Am Begleitschein müssen Sie Abfallart und -menge eintragen, Ihre Daten als Übergeber (mit gültiger GLN-Nummer) und den Transportbeginn.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.



BENÖTIGEN SIE EIN NEUES RETOURENLABEL?

Sie können flexibel, schnell und einfach ein neues Retourenlabel der **Österreichischen Post** drucken - **lesen Sie hierfür die Anleitung auf der Rückseite.**



BENÖTIGEN SIE EIN NEUES RETOURENLABEL?

Schnell und flexibel selbst drucken!

Ein Retourenlabel der Österreichischen Post befindet sich entweder in der beigelegten Lieferscheintasche Ihres Versandkartons, oder ist bereits am Karton angebracht. Sollten Sie jedoch ein neues Etikett benötigen, nutzen Sie einfach unser Retourenportal!

1

Besuchen Sie
www.metasys.com/oepost



Scrollen Sie nach unten
und klicken Sie auf den
JETZT STARTEN-Button.
Sie werden automatisch weitergeleitet.


Füllen Sie die **Pflichtfelder** (*) aus.

Geben Sie auch Ihre **E-Mailadresse** an,
wenn Sie das Retourenlabel in
einer Postfiliale bzw. am Frankier-
automaten drucken lassen möchten.

Dann auf „Weiter“ klicken.



RETOURENLABEL ONLINE

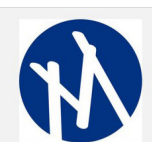

Retoure an METASYS logistics & collection GmbH

1 Absenderdaten eingeben 2 Retourenlabel drucken

Name * Max Mustermann
Straße / Nummer * Musterstrasse 1
PLZ / Ort * 6020 Musterstadt
Land Österreich

*Pflichtfelder

Wie möchten Sie Ihr Retourenlabel drucken?

- Retourenlabel selbst ausdrucken – PDF anfordern
- Retourenlabel in der Filiale bzw. am Frankierautomaten drucken lassen – QR Code und Barcode per E-Mail anfordern

Ihre E-Mail-Adresse

Informationen zum Druck des Retourenlabels:

Selbst ausdrucken – PDF anfordern

Einfach das Retourenlabel als PDF downloaden, ausdrucken und gut sichtbar auf Ihrem Retourpaket ankleben. Ihr Retourpaket können Sie dann in einer Post-Geschäftsstelle oder bei der Versandbox in der SB-Zone aufgeben.

Am Frankierautomaten oder in der Postfiliale ausdrucken – QR Code und Barcode per E-Mail anfordern

Wir senden Ihnen per E-Mail einen QR-Code und einen Barcode zu. Damit erhalten Sie Ihr Retourenlabel bequem am Filialschalter oder am Frankierautomaten in der SB-Zone. Geben Sie uns dazu ganz einfach Ihre E-Mail-Adresse bekannt.

Den mitgeschickten QR-Code scannen Sie einfach am Frankierautomaten direkt von Ihrem Smartphone und folgen dann den weiteren Anweisungen am Bildschirm. Um ein Label in der Postfiliale zu erstellen, lassen Sie den Barcode aus der E-Mail am Schalter scannen. Der genaue Ablauf ist ebenfalls im E-Mail beschrieben.

Felder leeren

weiter

2

PER E-MAIL:

Sie erhalten eine E-Mail mit einem QR-Code. Diesen scannen Sie in der SB-Zone am Frankierautomaten direkt von Ihrem Smartphone und folgen dann den weiteren Anweisungen am Bildschirm.

Um ein Label in der Postfiliale zu erstellen, lassen Sie den Barcode aus der E-Mail am Schalter scannen.



RETOURENLABEL ONLINE



Retoure an METASYS logistics & collection GmbH

1 Absenderdaten eingeben 2 Retourenlabel drucken

Sendungsnummer 1018365500171240760632

Wir haben Ihnen soeben ein E-Mail an geschickt.

Hinweis: Es kann einige Augenblicke dauern, bis die E-Mail bei Ihnen ankommt.*

Den mitgeschickten QR-Code scannen Sie einfach in der SB-Zone am Frankierautomaten direkt von Ihrem Smartphone und folgen dann den weiteren Anweisungen am Bildschirm. Um ein Label in der Postfiliale zu erstellen, lassen Sie den Barcode aus der E-Mail am Schalter scannen. Der genaue Ablauf ist ebenfalls im E-Mail beschrieben.

Ihr Retourenlabel

Datum: 10.01.2022 | Format: PDF | Größe: 92,73 kb

Retourenlabel doch selbst ausdrucken? Downloaden Sie einfach das Retourenlabel als PDF, drucken Sie es aus und bringen Sie es gut sichtbar auf Ihrem Retourpaket an. Ihr Retourpaket können Sie dann in einer Post-Geschäftsstelle oder bei der Versandbox in der SB-Zone aufgeben.

SELBER DRUCKEN:

Einfach „Ihr Retourenlabel“ anklicken und als PDF downloaden, ausdrucken und gut sichtbar auf Ihrem Retourpaket ankleben.

Ihr Retourpaket können Sie dann in einer Post-Geschäftsstelle oder bei der Versandbox in der SB-Zone aufgeben.

Retourpaket



PLC Version: 11.3



Absender / Sender
Max Mustermann
Musterstrasse 1
6020 Musterstadt

Absender Ref. / Sender Ref.: 1018365500171240760632
Paket Ref. / Package Ref.:

V

Empfänger / Deliver to
METASYS logistics & collection GmbH
Florianistraße 3
6063 Rum

Gewicht / Weight: 0,00 kg

RETPA


10 18365 50017124 07 6063 2

145657